



医療用品 04 整形用品
一般医療機器 皮膚用接着剤 33492101
プロヴォックス シリコン グルー

【警告】

使用方法

- ・ 子供の手の届かない場所に保管してください。
- ・ 目視で製品の外觀に問題ないことを確認した上で使用してください。
- ・ グルーが目に入ってしまったときは、すぐに吸水性の布でふき取ってください。
できるだけふき取ったあと、目を開けたまま15分以上水で洗い流してください。
炎症が出た場合、炎症が続く場合、もしくは、もの見え方が気になる場合には
医師の診察を受けてください。

【禁忌・禁止】

適用対象（患者）

- ・ 過敏な皮膚又は傷のある皮膚へは使用しないでください。
- ・ シリコンなど本品にアレルギーがあることが分かっている場合は使用しないでください。初めてご使用になる場合は、少量で試用いただき、発赤などアレルギー症状が出ないことを確認してください。

使用方法

- ・ 本品を使用後、他の方と共有しないでください。[接触感染するおそれがあります。]

【形状・構造及び原理等】

アドヒーシブ（別品）を貼る前に、グルー（本品）を塗ることで、アドヒーシブがより皮膚に接着します。

＜原材料＞

シリコン

＜原理＞

本品のシリコン成分により皮膚とアドヒーシブ間の接着が強くなる。

【使用目的又は効果】

本品は皮膚創部の接合又は補強等に用いる皮膚用接着剤として使用する。

使用目的又は効果に関連する使用上の注意

本品は主に永久気管孔周辺の皮膚へ貼るアドヒーシブの接着補助をする。

【使用方法等】

使用方法

＜初回使用時＞

- 1) 初めから取り付けられている白色フタを押しながら回して外します。
- 2) 蒸発が進まないよう素早く同梱のハケ付の黒色フタに取り換え、しっかりと回して締めます。白色フタは廃棄してください。

＜塗り方＞

- 3) 事前に気管孔周囲の皮膚をきれいにして乾かします。グルーを塗る前にスキンバリア（別品）を塗っておくと、アドヒーシブがより皮膚に接着します。また刺激から敏感肌を保護します。
- 4) 皮膚の上に塗ってごく薄い膜の層を作ります。フタを開けるとグルーの成分が自然蒸発しますので、塗っているときは息を止めて成分を吸い込まないようにしてください。またグルーが気管孔内に誤って入ってしまわないように、ハケに付いた余分なグルーを落としてから薄く塗ってください。
- 5) 必要に応じてグルーを二度塗ります。

6) 蒸発が進まないよう黒色フタをしっかりと締めます。

7) グルーを3分から4分そのままにして乾かした後に、アドヒーシブを貼ります。

＜剥がし方＞

8) 自然に剥がれるのを待つか、アドヒーシブリムーバー（別品）を使用します。アドヒーシブリムーバーはグルーが皮膚に残ってしまった場合に使用します。詳しくはアドヒーシブリムーバーに添付されている文書をご確認ください。

使用方法に関連する使用上の注意

- ・ グルーの蒸発成分を吸い込むと咳や炎症を起こしますので、フタを開けたら息を止めて成分を吸い込まないようにしてください。
- ・ グルーが気管孔内に誤って入ってしまわないように、ハケに付いた余分なグルーを落としてから塗るようにしてください。
- ・ グルーを塗ったあと、皮膚が炎症を起こしたり、不快に感じたりすることがあれば直ちに使用を中止して、数日間使用をお休みしてください。休止しても炎症が続く場合は、医師の診察を受けてください。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- ・ 高温、多湿、直射日光、水濡れを避けて保管してください。
- ・ 傾斜、振動、衝撃等のない安定した場所で保管してください。
- ・ 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管してください。

＜有効期間（未開封状態）＞

- ・ 本品の外箱に記載されている表示をご確認ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社アトスメディカルジャパン TEL 03-4589-2830

ホームページアドレス：<https://www.atosmedical.jp>

製造業者：ATOS Medical AB（スウェーデン）

取扱説明書を必ずご参照下さい。